

Link do produktu: <https://ekoway-shop.pl/polmaska-ffp3-x-310-sv-rd-p-53.html>



Półmaska FFP3 X 310 SV RD

Cena brutto	19,99 zł
Cena netto	16,25 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Półmaska FFP3 X 310 SV RD wielokrotnego użytku Oxyline z zaworem.

Ilość: 1 szt.

Specyfikacja:

- Klasa ochrony FFP3 (najwyższa)
- Kategoria III (najwyższa)
- Kolor: Biały
- Rozmiar: Uniwersalny
- Zastosowanie: Do wielokrotnego użytku
- Unisex
- Antysmogowa
- Antyalergiczna
- Przeciwpyłowa
- Chroniąca układ oddechowy
- Wielowarstwowego materiału filtracyjnego: polipropylen
- Zacisk nosowy dla formatowania półmasksi w obrębie nosa
- Zawór wydechowy z tworzywa sztucznego
- Taśmy nagłowia wykonane z nitek gumowych w oplocie
- Mocowanie taśm nagłowia wykonanego z tworzywa sztucznego
- Wewnętrznej wkładka, poprawiająca szczelność i komfort użytkowania
- Elastyczne taśmy zapewniają dobre uszczelnienie
- Zgodna z wymogami Europejskiej normy zharmonizowanej PN-EN 149+A1:2009 (EN 149:2001+A1:2009) „Sprzęt ochrony układu oddechowego - półmasksi filtrujące do ochrony przed cząstkami. Wymagania, badanie, znakowanie”
- Zgodny z wymogami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

Charakterystyka:

Półmaska filtrująca X 310 SV FFP3 R D przeznaczona jest do ochrony układu oddechowego przed aerozolami cząstek stałych, aerozolami na bazie wody (pył, dym) oraz aerozolami z ciekłą fazą rozproszoną (mgły) dla których NDS jest $\leq 0,05$ mg/m³ o ile stężenie fazy rozproszonej nie przekracza 30 x NDS.

Półmaska filtrująca zbudowana jest w głównej mierze z części twarzowej wykonanej z materiału filtrującego i akcesoriów pomocniczych w zależności od modelu półmasksi, takich jak taśmy nagłowne, zawór wydechowy czy uchwyty mocujące taśmy. Powietrze wdychane z otoczenia przechodzi przez materiał filtracyjny, gdzie jest oczyszczane. Powietrze wydychane usuwane jest na zewnątrz przez materiał części twarzowej (dla półmasek bez zaworu wydechowego) lub przez zawór wydechowy umieszczony w czaszy oraz część twarzową półmasksi (dla półmasek z zaworem wydechowym).

Czasza półmasksi podczas użytkowania winna ściśle przylegać do twarzy. Półmaska jest tak skonstruowana, aby można było w niej z łatwością oddychać w trakcie całej zmiany roboczej.

Dzięki anatomicznemu kształtowi oraz zaciskowi nosowemu i znajdującej się pod spodem piance, półmaska jest łatwa do dopasowania dla większości kształtów twarzy, tak aby zapewnić konieczną szczelność.

PARAMETRY UŻYTKOWE PÓLMASKI X 310 SV RD:

Użytkowanie i przechowywanie:

Półmaski należy przechowywać w temperaturze od -20°C do +40°C i wilgotności poniżej 70%. Przed użyciem półmaski, należy sprawdzić jej stan techniczny: czy jej elementy nie są uszkodzone. Półmaski uszkodzone oraz takie, których data ważności została przekroczona nie mogą być użyte.

Półmaski nie należy składać i zaginać.

W celu zapewnienia jak najlepszej szczelności części twarzowej, sposób zakładania i dopasowywania półmasek powinien przebiegać wg następującego schematu:

Przed założeniem półmaski, wstępnie ukształtować zacisk nosowy poprzez jego zaciśnięcie, co poprawia późniejsze dopasowanie półmaski do twarzy,

Umieścić część twarzową tak, aby przykrywała usta i nos,

Taśmy nagłowia założyć tak, aby dolna taśma obejmowała kark poniżej ucha, a górna przechodziła z tyłu głowy nad uchem;

Dopasować wstępnie uformowany zacisk nosowy tak, aby zapewnić szczelność;

Sprawdzić prawidłowość założenia; przyłożyć dłoń i przytrzymać czasę; mocno wydmuchnąć powietrze; w przypadku nieszczelności wyregulować pozycję czaszy, zacisk nosowy lub taśmy nagłowia.

Oferujemy tylko produkty z potwierdzonymi certyfikatami. Od 2008 roku współpracujemy ze wszystkimi najlepszymi polskimi producentami masek oraz z większością producentów europejskich, którzy podobnie jak i my restrykcyjnie podchodzą do jakości oferowanych produktów. Jesteśmy zarówno producentem jak i dystrybutorem oraz importerem produktów chroniących układ oddechowy.

Zapytania pod wyceny na zamówienia hurtowe powyżej 100 sztuk prosimy składać na adres: sprzedaz@ekoway.pl

Zadbaj o zdrowie swoje i swoich bliskich. Wybieraj produkty oznaczone potwierdzonymi certyfikatami i pochodzącymi z legalnych źródeł.

W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo firma Ekoway Sp. z o.o. podjęła decyzję o nie przyjmowaniu zwrotów oraz braku możliwości wymiany masek. Maski i filtry są towarem higienicznym, który zgodnie z art. 38. pkt. 5 ustawy o prawach konsumenta nie podlegają zwrotowi. Prosimy o przemyślane zakupy.